

器 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMN10201000

ダイカホルダー

再使用原則禁止

【禁忌・禁止】

再使用原則禁止

【形状・構造】



【性能・使用目的】

蝶番付き歯科用器具をいい、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。下顎運動の一部又は全部をシミュレートするように設計されている。

【品目仕様等】

上顎模型・下顎模型は分離できます。
側方運動が再現できますので、簡単な咬合形式の分析ができます

【操作方法又は使用方法等】

下顎模型は本体に直接取り付けます。
ダイカホルダーは上顎模型を直接上顎用ホルダーに取り付けます。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損・変更等が認められる場合は使用しないこと。
- ・基本的には再使用はできません。

<その他の注意>

- ・ABS樹脂製です。耐熱性はありません。
熱湯での洗浄はしないで下さい。
また、シンナー等の有機溶剤等で拭いたりしないでください。

【貯蔵方法・保管方法及び仕様期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

<有効期限・使用の期限>

使用期限・保証期間はありません。
納品時の不良以外は一切責任を負えません。

【包装】

20個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社センジョー

住 所：大阪府大阪市旭区大宮5丁目6番12号

電話番号：06-6953-2341(緊急：090-1912-2470)