

Metal Bur Stand

// Swing

メタルバー スタンド(スイング)

使用説明書




少しでも長く使って
いただくために、
この説明書をよく読み
正しくお使いください

PAT.1949164

各部の名称と使用方法


●カバーを取り外す

カバーを開けてそのまま後方へ押ししてください。
カバーは自然にはずれます。
図参照。

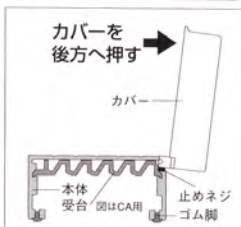

●カバーを取付ける

カバーのヒンジ部分を本体ピンに合わせて、上から強く押えてください。図参照。

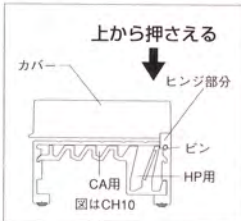

●止めネジとゴム脚

受台は止めネジで固定されています。清掃等で取り外す場合は、六角レンチで止めネジを緩め、受台を本体から抜いてください。
固定する場合は、受台が本体からはみ出さないようにネジロックを使用して固定してください。

*受台が本体からはみ出している状態で、カバーを無理やり外すと、ヒンジ部分が壊れます。

*ネジロックを使用しないで超音波洗浄を行いますと、ネジが徐々に緩んできます。

*止めネジの位置は機種により、異なります。

*あまり強く締め付けしないでください。

*六角レンチはM3用(1.5mm)をご使用ください。

ゴム脚は本体底部の孔に挿入されています。外れた場合は差し込んでください。

超音波洗浄と薬液滅菌について

スタンド本体にバー等を取納した状態で、超音波洗浄が行えます。
薬液滅菌はバー等が液に完全に浸るようにしてください。

【使用できる薬液】

グルタルアルデヒド、グルコン酸クロルヘキシジン、クレゾール石鹼液、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウム などを
ご使用ください。

【使用できない薬液】

消毒用アルコール(エタノール、イソプロパノール、アセトン)、クロロホルム、クロロベンゼン、アクリルモノマー などの溶剤は使用しないでください。

*ご注意:薬液の使用説明書に従って滅菌を行ってください。

*アルコール・接着剤等の雰囲気中では、カバーがヒビ割れを起こす場合があります。蓋を開けた接着剤等の側には置かないでください。

オートクレーブ滅菌について

オートクレーブの滅菌最高温度(132℃)以上になりますと、溶解・変形・劣化の原因となります(カバーについて)。

乾燥時の温度を確認してください。

オートクレーブの扉を開けて自然乾燥することをお薦め致します。

その他

・紫外線滅菌は、樹脂(カバー)が劣化します(寿命が短くなります)。お避けください。

・カバーの滅菌には、ドライクレーブ・ケミクレーブ滅菌には、適しません。使用しないでください。

・滅菌対象物は滅菌前に必ず洗浄してください。

・カバーにクラック等の外観変化が見られるときは、材質性能が落ちてきた時です(寿命です)。以降の使用はやめてください。

バリエーションと仕様

●基本形

下記の6種類があります。(シングルタイプ)

- ・FG用(F10)最大収納本数25本
- ・FG用ポット付(F11)収納本数20本
- ・CA用(C10)最大収納本数25本
- ・HP用(H10)最大収納本数25本
- ・CA・HP混合型(CH10)最大収納本数 CA 20本
HP 5本

・リマー用(R10)最大収納本数30本

●基本形2個を連結したツインタイプがあります。

●それぞれに浅型と深型の(4種類の)カバーが有ります。

■仕様

- サイズ:本体……(W)50×(D)70×(H)34mm
ツイン……(W)100×(D)70×(H)34mm
浅型カバーをセットした場合……(H)54mm
深型カバーをセットした場合……(H)68mm

- 材質:本体…アルミニウム ピン…ステンレス
ゴム座…シリコンゴム カバー…ポリサルホン
ポット…P.P. HPガイド…T.P.X.

株式会社 センジヨー

大阪市旭区大宮5丁目6番12号 〒535-0002
TEL.06-6953-2341 FAX.06-6954-0080

06.11.3.000(U)