

color caps system

Metal Endo Stand


カラーキャップ付・メタルエンドスタンド
使用説明書




少しでも長く使っていただくために、
この説明書をよく読み
正しくお使いください。

各部の名称と使用方法

- **カバーを取り外す**
カバーを開けてそのまま後方へ押ししてください。カバーは自然にはずれます。図参照。

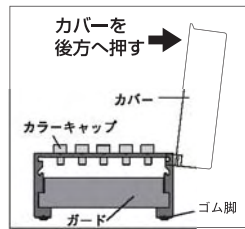

- **カバーを取付ける**
カバーのヒンジ部分を本体ピンに合わせて、上から強く押えてください。図参照。

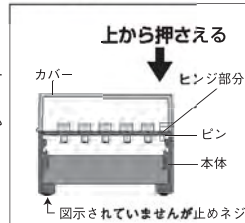

- **止めネジとゴム脚**
ガードは止めネジで固定されています。清掃等で取り外す場合は、M3mm(1.5mm)の六角レンチでネジを緩め、本体から抜いてください。ゴム脚は本体部の孔に挿入されています。外れた場合は差し込んでください。

- **カラーキャップ**
シリコンゴム製カラーキャップは、6色(白・黄・赤・青・緑・黒)各5個ずつ(ツインは各10個)入っています。このキャップの色を自由に組み合わせ、本体の孔に挿入してください。
#10は別売の紫色をご使用下さい。
*蓋底を持つと、リーマー・ファイルに触れる恐れがあります。本体の前後またはガードの両端を持つようにしてください。

超音波洗浄と薬液滅菌について

スタンド本体にリーマー・ファイルを収納した状態で、超音波洗浄が行えます。薬液滅菌はリーマー・ファイルが液に完全に浸るようにしてください。

【使用できる薬液】
グルタルアルデヒド、グルコン酸クロロヘキシジン、クレゾール石炭酸液、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウム などをご使用ください。

【使用できない薬液】
消毒用アルコール(エタノール、イソプロパノール、アセトン)、クロロホルム、クロロベンゼン、アクリルモノマーなどの溶剤は使用しないでください。
*ご注意;薬液の使用説明書に従って滅菌を行ってください。
*アルコール・接着剤等の雰囲気中では、カバーがヒビ割れを起こす場合があります。蓋を開けた接着剤等の側には置かないでください。

オートクレーブ滅菌について

オートクレーブの滅菌最高温度(132℃)以上になりますと、溶解・変形・劣化の原因となります(カバーについて)。乾燥時の温度を確認してください。オートクレーブの扉を開けて自然乾燥することをお薦め致します。

その他

- ・紫外線滅菌は、樹脂(カバー)が劣化します(寿命が短くなります)。お避けください。
- ・カバーの滅菌には、ドライクレーブ・ケミクレーブ滅菌には、適しません。使用しないでください。
- ・滅菌対象物は滅菌前に必ず洗浄してください。
- ・カバーにクラック等の外観変化が見られるときは、材質性能が落ちてきた時です(寿命です)。以降の使用はやめてください。

バリエーションと仕様

- シングルタイプ(R10) 最大収納本数30本
蓋は<スイング>の浅型小用です。互換性がありますので、<スイング>のシングルタイプと連結して使用することができます。
- ツインタイプ(R20) 最大収納本数60本
蓋は<スイング>の浅型大用です。

仕様

サイズ: 本体……
シングル…(W)50×(D)70×(H)33mm
ツイン……(W)100×(D)70×(H)33mm
浅型カバーをセットした場合……(H)53mm

材質: 本体…アルミニウム ピン…ステンレス
ゴム座…シリコンゴム カバー…ポリサルホン

別売品

カラーキャップ 6色各10個(計60個)入
紫色30個入
スイング カバー(蓋)浅型小
スイング カバー(蓋)浅型大

株式会社 **センジヨー**
大阪市旭区大宮5丁目6番12号 〒535-0002
TEL.06-6953-2341 FAX.06-6954-0080