


ニューサライバーZ 接続の手引き


一般的な排唾管ラインへの接続方法

ほとんどのメーカーのサライバーエジェクターに直接挿入致します。
「トライアルキット」のみで対応できます。

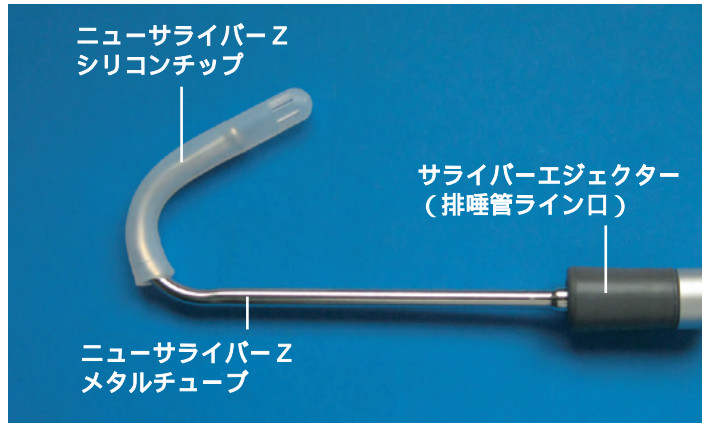


オサダ・キングの排唾管への接続方法

オサダ・キングのサライバーエジェクターの口径は細いので、
別売の排唾管アダプターを用いて接続してください。

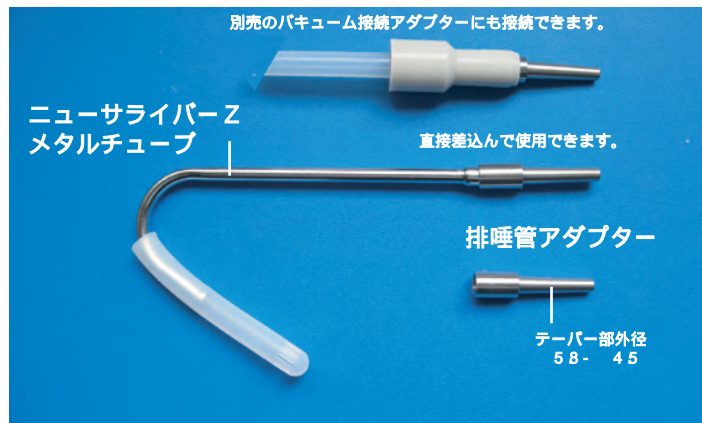


モリタ以外のパキュウムシリンジへの接続方法

パキュウム接続アダプターのチューブにメタルチューブを挿入し、パキュウム
接続アダプターのアダプターをパキュウムシリンジに挿入します。
大口径の16mmにも対応できます。

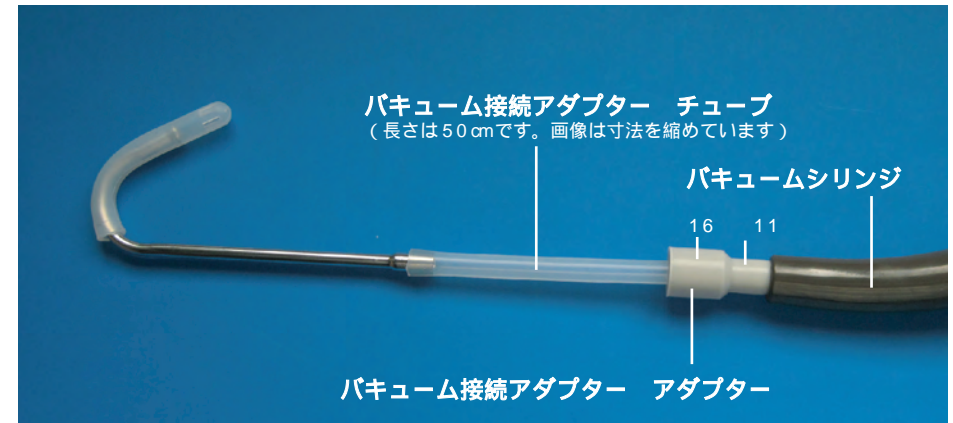

モリタのパキュウムシリンジへの接続方法

パキュウム接続アダプター と 10-11変換アダプターを用いて接続
致します。

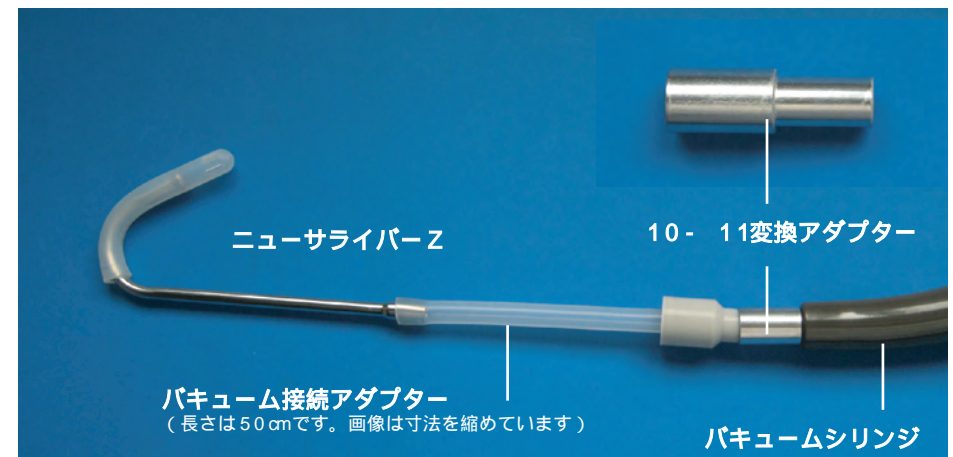

株式会社 センジヨー

〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮5-6-12 E-mail: info@sen.jp.co.jp
TEL 06-6953-2341 FAX 06-6954-0080 URL: http://www.sen.jp.co.jp