


カラー バキュームチップゴム ソフト

【形状・構造及び原理等】

形状

φ10mm(モリタ仕様)用とφ11mm用の2種類があります。

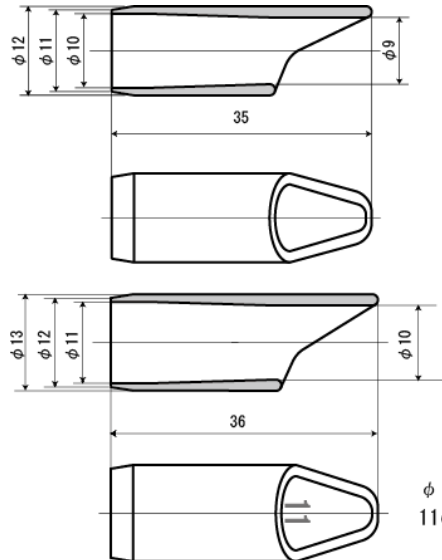

各サイズ共、下記の色があります。

- ・ブルー
- ・ライトブルー
- ・グリーン
- ・ピンク
- ・イエロー

φ11mm用は製品に11のマーク。

材質

シリコンゴム

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう。本品は滅菌後に再使用する。

【使用方法等】



再使用のために必要な処置

電子線滅菌・過酸化水素ガス滅菌・EOG滅菌可能。
薬液滅菌ではグルタールアルデヒド、次亜塩素酸ナトリウムを推奨します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
使用目的以外の目的で使用しないこと。
サイズの誤用は、トラブルの原因となります。
適切なサイズをご使用ください。
硬化・亀裂等の外観変化が認められる場合は使用しない。

洗浄・滅菌に関する注意

滅菌は、バキュームチップ(管)より外して、洗浄した後に行ってください。オートクレーブ滅菌は135℃以下で行ってください。乾燥時に高温になる機器がありますのでご注意ください。洗浄液または消毒液に長時間浸漬すると、膨潤することがあります。薬剤の説明書に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
紫外線滅菌は避けてください。劣化が早まります。

有効期間

使用条件で差がありますが、オートクレーブ滅菌で100回程度を目安にしてください。
定期的な交換をお勧め致します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社センジョー
製造業者：株式会社センジョー